



gebruiksaanwijzing

Boemerang SMALL/MEDIUM

Indicatie

Compenseren van flecterende nek, romp en/of armen. Ondersteuning en preventie voor decubitus aan hoofd, nek, schouders, (thoracale) wervelkolom, armen en/of knieën.

Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® BOEMERANG (SMALL/MEDIUM) als nek-/kniekussen gebeurt op basis van de volgende twee stappen.

Stap 1:

Positioneer de ligorthese onder de nek of knieën van de cliënt.

Stap 2:


Masseer de zijkanten van het kussen langs het lichaam, zodat nek, romp of knieën optimaal worden ondersteund.

Small

Voor ondersteuning van de nek kan de FlexiOr® BOEMERANG SMALL toegepast worden. Daarnaast kan de ligorthese ook als kniekussen worden gebruikt. Tip: bij ernstige contracturen of pijnklachten aan knieën kan het kussen gecombineerd worden met een FlexiOr® DIPLEG ligorthese.

Medium

Bij zowel lig- als zithouding kan de FlexiOr® BOEMERANG MEDIUM worden toegepast ter ondersteuning van de nek, romp en armen. Tip: door het kussen op schoot of op een werkblad te plaatsen worden geflecteerde armen ondersteund en worden bedreigde ellebogen tegen decubitus beschermd.

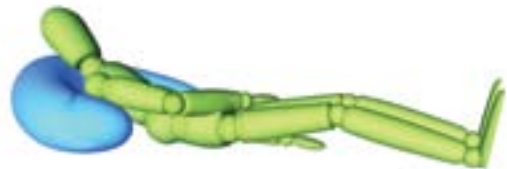



gebruiksaanwijzing

Boemerang LARGE/XL

Indicatie

Compenseren van flecterende nek, romp en/of armen. Ondersteuning en preventie voor decubitus aan hoofd, nek, schouders, (thoracale) wervelkolom, armen en/of knieën.

Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® BOEMERANG (LARGE/XL) als nekkussen gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

Stap 1 (optioneel):

Plaats een 'standaard' hoofdkussen verticaal onder de nek van de cliënt vanaf lumbaal*.

Stap 2:

Positioneer de ligorthese onder het lichaam van de cliënt en (eventueel) bovenop het hoofdkussen.

Stap 3:

Masseer de zijkanten van het kussen langs het lichaam, zodat nek, romp en/of armen optimaal worden ondersteund.

* *Tip: de uitvoeringen LARGE en XL van de FlexiOr® BOEMERANG ligorthese zijn leverbaar met een geïntegreerd lumbalkussen.*

Large

Specifiek voor ondersteuning in bed is de FlexiOr® BOEMERANG LARGE ontwikkeld. Het kussen biedt ondersteuning bij zowel rug- als zijligging en is lang genoeg om naast de nek, romp en armen ook de handen te ondersteunen.

XL

Bij rug-, zij- en buikligging, maar ook bij een zittende houding biedt de EXTRA LARGE-uitvoering van de FlexiOr® BOEMERANG adequate ondersteuning en ontspanning. Daarnaast biedt het kussen bescherming aan sterk geflecteerde armen en handen.



hoofdkussen optioneel



PAS ALTIJD 30-45° WISELLIGGING TOE
VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING
VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIIGGING