



gebruiksaanwijzing

Antispitsvoetrol

Indicatie

Tegengaan van spitsvoeten, onderuitzakken en decubitus aan hielen.

Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® ANTISPITSVOETROL gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

Stap 1:

Breng het kussen vanaf het voeteneind achter de voeten aan.

Stap 2:

Positioneer de benen van de cliënt met minimale druk tegen de orthese.


Stap 3:

Zorg ervoor dat het kussen niet achter de voeten vandaan kan rollen.

** Situatieschets: cliënt ligt in rugligging (of halfzittende houding), ligorthese horizontaal, het brede gedeelte wijst richting cliënt.*

Attentie

- Rugligging wordt bij het aanbrengen van de steunrollen als uitgangspositie aangenomen.
- Er wordt geadviseerd om altijd 30-45° wisselliging toe te passen. Aangezien het kussen zich voegt naar de houding van de cliënt hoeft de orthese hierbij niet verwijderd te worden.

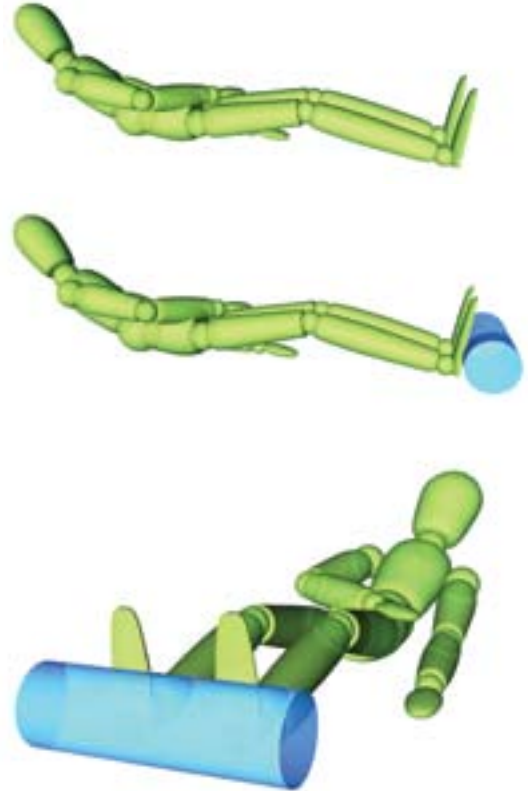

PAS ALTIJD 30-45° WISELLIGGING TOE
VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING
VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIIGGING