



gebruiksaanwijzing

Steunrol Maxi

Indicatie

Ondersteunen en beschermen van hoofd, romp, armen, knieën en benen.

Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® STEUNROL MAXI als nek- en rompondersteuning gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

Stap 1 (optioneel):

Plaats een 'standaard' hoofdkussen verticaal onder de nek van de cliënt vanaf lumbaal.

Stap 2:


Positioneer de ligorthese langs het lichaam en onder de nek van de cliënt en (eventueel) bovenop het hoofdkussen.

Stap 3:

Masseer de zijkanten van het kussen langs het lichaam en (eventueel) tussen de benen, zodat nek, romp en ledematen optimaal worden ondersteund.

Attentie

- Rugligging wordt bij het aanbrengen van de steunrollen als uitgangspositie aangenomen.
- Er wordt geadviseerd om altijd 30-45° wisselligging toe te passen. Het kussen voegt zich naar de houding van de cliënt.

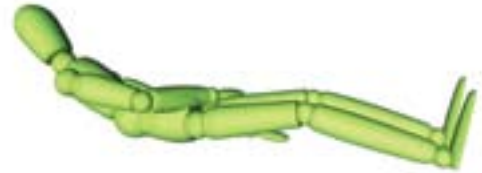

hoofdkussen optioneel

